



～ DICOM ビューアの基本的な操作と使用方法 ～

1. 当院が提供するDVDに添付している簡易 DICOM ビューアの基本的な操作方法

動画にしてみましたので、以下のQRコードから参照ください



『INFINITT 簡易ビューアの操作方法』

～ビューアの表示～

- 01 ディスクをDVDドライブにセットします
- 02 自動再生ウィンドウが表示された場合『AUTORUN. EXE の実行』を選択します
※自動再生ウィンドウが表示されない場合はDVDドライブのフォルダを開き、『AUTORUN. EXE』をダブルクリックします
- 03 ウェブブラウザにてCD Publisher ウィンドウが開くのでピンク色の『DICOM』ボタンをクリックします
- 04 INFINITT の表示と共にデータ読み込みが開始します（画像データの読み込みに少し時間がかかります）
- 05 CD Publisher 画面となり『検査結果』リストが表示されるので、患者さんを選択して右上の『検査表示』をクリックするとビューアが表示されます

～ビューアの基本操作～

- 06 簡易ビューアが開き、最初の画像が1画面で表示されます
- 07 左端に各シリーズ画像が表示されます
- 08 左端のシリーズ一覧から表示したいシリーズをクリックするとそのシリーズ内の画像（イメージ画像）が表示されます
- 09 マウスのスクロールボタンを動かすことによりイメージ画像が順次表示されます

ご予約は 022-273-3141（検査予約直通）までお願い致します。

※医療機関様の画像検査予約直通回線です。

※ご要望ご質問がありましたら、ご連絡ください。



～画面分割して複数シリーズ表示をします～

- 10 『1x1』のボタンをクリックします
- 11 プルダウンメニューが表示されるので、希望の分割数を選択します
- 12 『2x3』を選択した場合、各シリーズ画像が6分割で表示されます
- 13 左端の各シリーズ画像から見たいシリーズを、各枠にドラッグ&ドロップ可能です
- 14 左端上部にあるクリップの様な『クロスリンク』ボタンをクリックすると各シリーズが連動します
- 15 マウスのスクロールボタンを動かすと画像が連動して表示されます
- 16 イメージを大きく表示させるにはダブルクリックすると1画面表示になります
- 17 再度ダブルクリックすると元の画像サイズに戻ります

～ビューアの終了～

- 18 終了したい場合は左下の『終了』ボタンをクリックします
- 19 『開いている検査があります。閉じますか？』と表示されるので『yes』をクリックします
- 20 CD Publisher 画面にて右上の『×』ボタンをクリックして終了です

2. オンラインの無料 DICOM ビューアを使用する

DICOM 画像を取り扱うため、簡易ビューアはPCシステムへの要求が高く、PCによっては表示速度にストレスを感じる場合もあります。

その様な時は以下の様なオンラインの無料DICOM ビューアを御使用いただく手段もあります。

<https://www.imaios.com/jp/Imaios-Dicom-Viewer>

ただし、医療用ではないこと、セキュリティの面に注意が必要ながあります。

